

▶▶ 8020 口腔ケアセット 個別商品詳細情報 4

歯のピーリング スポンジ

(ステインクリーナー) 3個入

歯磨きだけでは落ちない、
歯の着色汚れに。

お茶、コーヒー、喫煙、口紅・・・
歯の表面の着色汚れをぬらして磨くだけの
簡単ケア

歯ブラシの毛先より小さなミクロン成型のメラミン
フォームが、歯ブラシだけでは落ちにくい歯の表面に付
いた汚れやくすみをとします。



製品の特徴

- メラミンフォームは適度な柔らかさがあり、歯を傷つけないので安心。またホルマリンフリーなので安心してお使いいただけます。
- 【実用新案】
歯ブラシ具：実用新案登録No.3136247

使用方法

圧縮メラミンフォーム部分に水をつけてぬらし、歯の表面の汚れをこするように磨きます。

使用上の注意


- ・必ず水にぬらしてから磨いてください。
- ・歯ぐきにあたらぬようにお使いください。
- ・差し歯などの人工歯には使わないでください。
- ・メラミンフォームの側面は使用しないでください。
- ・強くこすりすぎるとメラミンフォームが破れる場合があります。
- ・1週間に一度のペースで使用しましょう。

材質

- ・清掃部：特殊メラミンフォーム
- ・本体：ポリプロピレン
- ・日本製

ミクロン成型の 圧縮メラミンフォーム

2~3ミクロンの繊維で
歯の表面に入り込んだ汚
れを落とします。

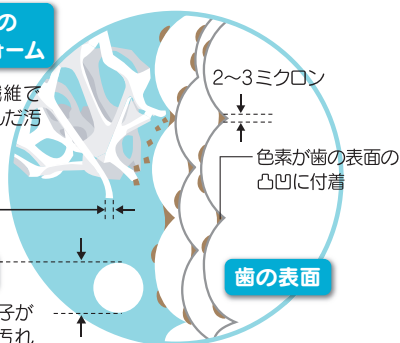

歯磨き粉の粒子

5~10ミクロン。粒子が
大きいから、着色汚れ
に届かない

